

everStick™ Ortho



Forsettelse..

Forsett uten silicon-
instrumentet; press
fiberbunten til én tann av
gangen, mens du skjærer
resten av bunten fra lyset.

Lysherd kort tid på hver
tann.

Etter at hele retainer'en er
plassert, dekker du med
kompositt og lysherder.

everStick™ Ortho

Generell informasjon:

everStick® Ortho er et halvfabrikata laget av glassfiber og en polymer/resin gel matrix for forsterkning av dentale akryler og kompositter.

everStick® Ortho består av ensrettede fibre som øker styrken og stivheten i sluttproduktet på tvers av fibre.

everStick® Ortho brukes som en kjeveortopedisk retainer.

everStick® Ortho består av 1000 glassfibere. Den har en diameter på 0,75 mm, noe som gir et areal i tverrsnittet på ca. 0,5 mm².

Kliniske fordeler ved everStick Ortho:

1. Spar tid og penger – ikke nødvendig med modell, kun ett besøk
2. Elastisitetsmodul tilnærmet lik dentin (ca. 28 Gpa)
3. Enkel i bruk
4. Ikke nødvendig å “pre-bøye” før plassering
5. Pålitelig adhesive bonding
6. Fullstendig transparent:
Meget enkelt å oppnå tannfargede retrainere
7. Benyttes på pasienter med metallallergi
8. Benyttes som langtidsretainer
9. Pasientvennlig: lett å holde ren, føles naturlig og er meget estetisk

Bestillingsinformasjon:

FO5360 2 x 12 cm everStick Ortho

Technomedics Norge AS

Tlf. 69 88 79 20 Fax. 69 88 79 39 e-mail: firmapost@technomedics.no

Import Norge:

Technomedics Norge AS

Tlf. 69 88 79 20 Fax. 69 88 79 39

www.technomedics.no


everStick™Ortho

everStick™Ortho

Retainer-veiledning:



Rengjør overflatene med pimpstein.
Sett inn tannstikkere i
approksimal-rummene for å
beholde plass for rengjøring.

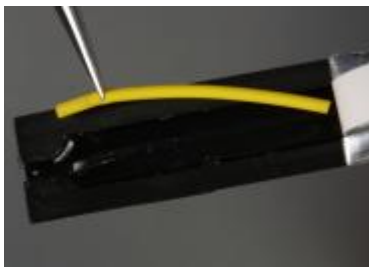

Mål riktig lengde med
everStick™Ortho med en
tanntråd eller f.eks Wedjet som
vist i dette tilfellet.



Med vanlig saks kutter du riktig
lengde av fibre fra pakken.
Lukk pakken for å forhindre
herding av resten av bunten.



Fortsettelse...
Etter syreetsing, påføring og
lysharding av bonding på
tannoverflaten påføres et
tynt lag med flytende
kompositt på tennene.
Ikke lysherd ennå.



Plasser enden på everStick
Ortho fibre-retainer'en ved
å presse den på plass med
et silikon-instrument; Refix
D eller forpakkings-
silikonen fibre leveres i.



Lysherd kort, men skjem
resten av fiberbunten
fra lyset med et bredt instr-
ument f.eks. Stick Stepper
eller en spatel.

fortsetter ...