



NTI-Kahla GmbH · Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3 · D-07768 Kahla/Germany
Tel. +49(0)36 424-573-0 · Fax +49(0)36 424-573-29
E-mail: nti@nti.de · http://www.nti.de

Diamantstrips med holder (ProxyStrip)



Fargemerking,
f.eks. rød = kornstørrelse F

NO Produkt- og bruksanvisning for diamantstrips og ProxyStrip-systemet

Innhold:

1. Produktbeskrivelse
2. Indikasjon for ProxyStrip-systemet og diamantstrips
3. Kontraindikasjoner for ProxyStrip-systemet og diamantstrips
4. Anbefalinger for bruk
 - 4.1. Bruk av ProxyStrip-systemet
 - 4.1.1. Bruk av ProxyStrip med håndtak
 - 4.1.2. Bruk av ProxyStrip uten håndtak
 - 4.1.3. Bruk av ProxyStrip med sagfortanning
 - 4.2. Bruk av diamantstrips
 - 4.2.1. Diamantstrips uten sagfortanning
 - 4.2.2. Diamantstrips med sagfortanning
5. Instruksjoner for repressering med instrumentkontroll, lagring og transport

1. Produktbeskrivelse:

Tiltent bruk: dental bruk

Kun utdannede spesialister (tannleger) kan bruke diamantstrips og ProxyStrip-systemet med tilhørende systemkomponenter. Bruksanvisningen må leses nøye før diamantstripsene og ProxyStrip-systemet tas i bruk.

Bruksområder:

Proksimal og interdental utforming av alle fyllingsmaterialer, fjerning av overfylte sementer i protetik, tannrensing og for ASR (approssimal emaljereduksjon) i kjeveortopedi.

Komponenter i Proxy Strip-systemet:

Systemet består av en diamantstripsholder (ProxyStrip) med perforerte og ensidig belagte diamantstrips og et tilhørende håndtak. Diamantstripsene finnes i tre ulike kornstørrelser (blå = medium korn, rød = fint korn og gul = superfint korn) og en separat sagfortanning uten diamantbelegg.

Komponenter i diamantstrips:

Diamantstrips er metallstrips med et diamantbelegg på den ene siden. De finnes i tre ulike kornstørrelser (blå = medium korn, rød = fint korn og gul = superfint korn) og i ulike varianter. Bred og heldiamantbelagt på den ene siden, smal med ikke-diamantbelagt midtseksjon, med og uten perforering, samt varianter med og uten sagfortanning.

2. Indikasjon for ProxyStrip-systemet og diamantstrips:

ProxyStrip kan brukes med eller uten håndtak. Diamantstrips og ProxyStrip brukes innenfor de samme områdene.


- Interdental, proksimal og dorsal formgivning for alle fyllingsmaterialer, glassmonomersementer og kompositter.
- Interdental, proksimal og dorsal fjerning og behandling av overflødig sementrester og adhesive binde-midler i kroner og broer, samt inlays, onlays og delkroner.
- ASR (approssimal emaljereduksjon) eller for slicing eller stripping innen kjeveortopedi.

3. Kontraindikasjon for diamantstrips og ProxyStrip-systemet

Diamantstrips og ProxyStrip-systemet er ikke egnet for okklusal, oral eller vestibulær formgivning og må ikke brukes innenfor disse områdene. Instrumentene er ikke egnet eller godkjent for kirurgisk bruk.

4. Anbefalinger for bruk:

Diamantstripsene og hele ProxyStrip-systemet kan brukes flere ganger. Diamantsiden av stripsene vender mot overflaten eller materialet som skal behandles.

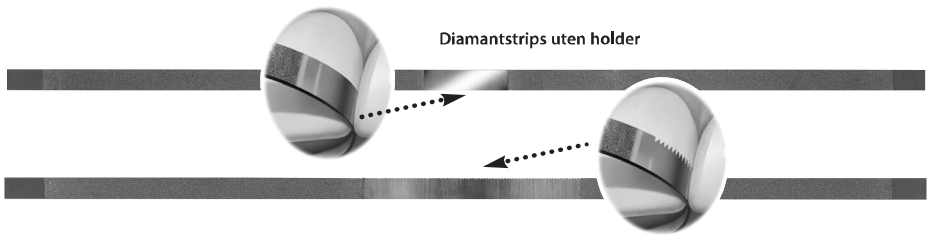

ProxyStrip-håndtak (valgfritt)



4.1. Bruk av ProxyStrip-systemet:

Systemet kan brukes med eller uten håndtak. Stripsene er fargekodet i henhold til kornstørrelse. Blått betyr medium korn, rødt betyr fint korn, og gult betyr superfint korn. Den hvite ProxyStrip har sagfortanning uten diamantbelegg. Det må alltid utvises forsiktighet for å sikre at papillen ikke skades under bruk.

4.1.1. Bruk med håndtak:

Hold håndtaket i hånden med firmanavnet vendt oppover, og skyv ProxyStrip, med diamantstripsen vendt ned, inn på det runde området på tuppen av håndtaket og klikk den på plass. ProxyStrip-holderen har en fargemerking på den siden der stripsen er diamantbelagt (se illustrasjonen ovenfor). De ulike låseposisjonene gjør det mulig å justere stripsen til den ideelle vinkelen for bruksområdet. Før hver bruk må du kontrollere at ProxyStrip sitter godt på plass.

4.1.2. Bruk uten håndtak:

Hvis ProxyStrip brukes uten håndtak, må den sikres med en sikkerhetskjede, tanntråd eller lignende for å forhindre svelgning eller aspirasjon. Slipesiden av stripsene er merket med en fargekode på plasten (se illustrasjonen ovenfor). ProxyStrip-holderen holdes mellom tommelen og peke- eller langfingeren.

4.1.3. Bruk av ProxyStrip med sagfortanning (uten diamantbelegg):

Sagfortanningen kan brukes med eller uten håndtak. Se bruk 4.1.1 og 4.1.2. Også her må man passe på å ikke skade papillen ved bruk av sagfortanningen.

4.2. Diamantstrips:

4.2.1. Diamantstrips uten sagfortanning, med og uten perforering:

Perforeringen gir stripsene bedre slipeevne. Sett inn diamantstrips med en sagende bevegelse med det ikke-diamantbelagte området interdentalt, og trekk den i neste trinn over materialet eller tannen med det diamantbelagte området med en slipende bevegelse. Stripsen ligger tett inntil den gjenværende tannen. På denne måten fjernes overflødig materiale, eller den anatomiske formen skapes. Unngå å bøye stripsene, da dette kan føre til brudd og avskalling av diamantbelegget.

4.2.2. Diamantstrips med sagfortanning, med og uten perforering:

Sagfortanning brukes i trange områder for interdental separasjon. Når den proksimale kontakten er skilt fra hverandre, fjerner du stripsen og snur den. Sett den inn med den ikke-sagende siden, og fortsett som beskrevet under 4.2.1. Unngå skade på papillen

5. Instruksjoner for repressering og instrumentkontroll:

Merk: Plastdelene i ProxyStrip-systemet må ikke komme i kontakt med alkohol.

Systemet skal bare represseres tatt fra hverandre i enkeltdele (håndtak, ProxyStrip).

Begrensning av repressering: -10x

Detaljerte anbefalinger om repressering i henhold til DIN EN ISO 17664 se www.nti.de

Instrumentkontroll:

Brukeren er forpliktet til å teste materialets egnethet for den tiltente bruken på eget ansvar. Dette er spesielt nødvendig hvis bruken ikke er spesifisert i produktinformasjonen.

Skadede, bøyd eller slitte ProxyStrips og diamantstrips må straks sorteres ut og ikke lenger brukes. Håndtaket på ProxyStrip-systemet må alltid kontrolleres for sprekker, knekk eller brudd. Heller ikke her må skadede håndtak brukes lenger, og de må kastes umiddelbart.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som skyldes manglende overholdelse av disse instruksjonene eller feilaktig bruk som beskrevet i bruksanvisningen.

Oppbevaring og oppbevaringsinstruksjoner:

Oppbevares tørt ved romtemperatur ca. 20 °C og 40-60 % luftfuktighet, beskyttet mot ny kontaminering. Instrumentene må alltid beskyttes mot støv, kjemikalier, syrer, varme og ekstreme temperatursvingninger. Alle deler av ProxyStrip-systemet og diamantstripsene skal oppbevares på en slik måte at ingen andre instrumenter eller materialer plasseres på dem. Knekk må også unngås for enhver pris.

Transport og kassasjon:

Etter rengjøring og desinfeksjon må instrumentene kasseres i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter.